

Herramienta de evaluación del área periestomal

Defina el perfil del área periestomal de su paciente para identificar la solución más adecuada.

Nombre del paciente _____

Fecha _____

1	La forma del área periestomal La forma puede cambiar al sentarse, acostarse o moverse.	Regular	El área periestomal está al nivel de la piel, aunque la superficie de la piel pueda presentar irregularidades.
		Hundido	Se hunde en el abdomen
		Elevado	Se eleva por sobre el abdomen creando un pico

Regular



Hundido



Elevado



2	Uniforme o variable	Uniforme	Esta forma es consistente alrededor del ostoma
		Variable	Esta forma no es consistente alrededor del ostoma

Regular

Uniforme



Hundida

Uniforme



Elevada

Uniforme



Variable



Variable



Variable



3	Abdomen blando o firme	Blando	El área cede a la presión
		Firme	El área resiste a la presión (like when pressing under your heel)

Abdomen suave



Abdomen firme




4	Irregularidades superficiales o pliegues profundos	Superficial	La piel está arrugada o irregular
		Profundo	El área tiene pliegues profundos de piel suelta o exceso de grasa

Irregularidades superficiales



Pliegues profundos

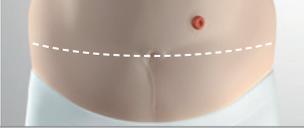

5	Ubicación del ostoma	Sobre la línea de flexión	Cerca de las costillas	
		En la línea de flexión	A la altura de la línea de flexión del abdomen	
		Por debajo de la línea de flexión	Por debajo de la línea de flexión del abdomen	
		Sobre la línea de flexión	En la línea de flexión	Debajo de la línea de flexión
				

6	Posición de la boca del ostoma	Sobre la piel	El ostoma sobresale por encima de la piel	
		A la altura de la piel	El ostoma está al nivel de la piel	
		Por debajo de la piel	El ostoma está retraído por debajo de la piel	
		Boca del ostoma por encima de la superficie de la piel	Boca del ostoma a la altura de la superficie de la piel	Boca del ostoma por debajo de la superficie de la piel
				

7	Tipo de deposiciones	Consistente	
		Líquido	
		Orina	

Solución de ostomía recomendada

Adhesivo	Sistema	Tipo de dispositivo
Plano	1-pieza	Abierto
Convex Soft	2-piezas	Cerrado
Convex Light		Uro
Convex Deep		

Productos complementarios*

*Consulte la rueda de Brava Productos Complementarios.

Consulte a su representante de ventas para más información.