

Uso de apósito Comfeel Plus en el tratamiento de herida traumática desbridada

Autores: Petra Quintens: Personal de enfermería independiente para atención domiciliaria, Bélgica

Introducción

Herida traumática que fue tratada por la propia paciente, pero se transformó en herida necrosada con estancamiento. Después del desbridamiento mecánico (a cargo de un médico), se evaluó la lesión por medio del "Triángulo de Heridas" y se la trató como herida limpia aguda.

Paciente



- Mujer de 71 años, con EPOC, frecuentemente tratada con corticoides. No fumadora, todavía móvil.
- La paciente tropezó con una silla, lo que le provocó una herida en la pierna. Decidió tratar la herida ella misma, pero esto llevó a la aparición de tejido necrótico y estancamiento de la cicatrización de la herida.
- El médico realizó desbridamiento mecánico que terminó en una herida aguda roja.



Evaluación inicial de la herida

Tamaño de la herida

Largo	25 mm
Ancho	15 mm
Profundidad	5 mm




Describe los hallazgos según tipo de tejido y exudado.

En otros, marque "x" para los hallazgos positivos de la evaluación o indique "0" si no está presente.

Evaluación del borde de la herida:

- Maceración
- Deshidratación
- Cavitados
- Bordes engrosados

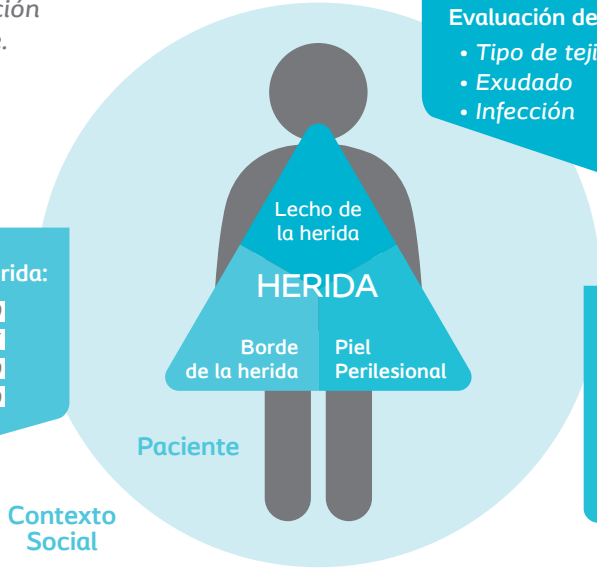

Evaluación del lecho de la herida:

- Tipo de tejido
- Exudado
- Infección

Evaluación de la piel perilesional:

- Maceración
- Excoriación
- Piel seca
- Hiperqueratosis
- Callos
- Eczema



Objetivos de manejo de la herida

Marque "x" para todos los objetivos de manejo que correspondan




Evaluación del borde de la herida:



Objetivos de manejo:

- Manejo de exudado
- Rehidratar el borde de la herida
- Eliminar tejido no viable
- Proteger la granulación/tejido

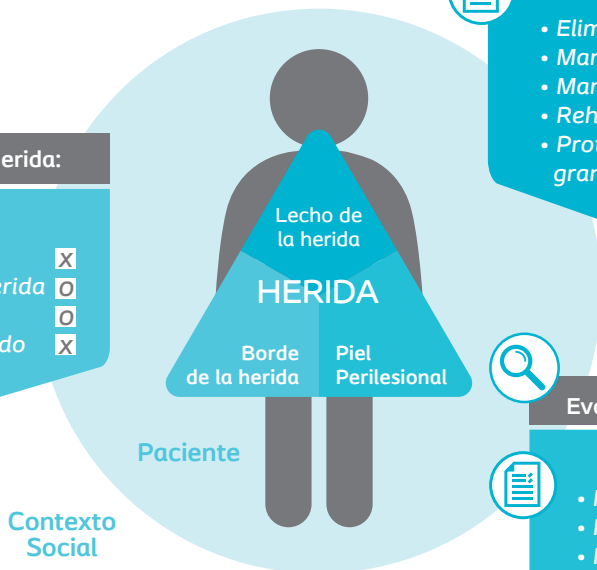

Evaluación del lecho de la herida:



Objetivos de manejo:

- Eliminar tejido no viable
- Manejo de exudado
- Manejar la carga bacteriana
- Rehidratar el lecho de la herida
- Proteger el tejido de granulación / epitelial



Evaluación de la piel perilesional:



Objetivos de manejo:

- Manejo de exudado
- Proteger la piel
- Rehidratar la piel
- Eliminar tejido no viable

Tratamiento

Antes: la paciente intentó tratar la herida ella misma con Flaminal® Hydro, lo que dio por resultado necrosis de la herida. El médico desbridó mecánicamente, lo que derivó en una herida aguda de granulación roja.

Tratamiento: Brava® Protector de Piel, Spray, en los bordes de la herida, Comfeel® Plus (17 días) en la herida. Terapia compresiva debido a insuficiencia venosa.

Se realizó el recambio de Comfeel® Plus cada 3 días, y al final, cuando el nivel de exudado disminuyó, se utilizó Comfeel® Plus Transparente con Brava® Protector de Piel, Spray (últimos 10 días).

Resultados

Se obtuvieron muy buenos resultados con el tratamiento.

Treinta días de tratamiento: 20 días de uso de Comfeel® Plus, 10 días de uso de Comfeel® Plus Transparente combinado con Brava® Protector de Piel, Spray (protección de bordes).

La herida fue cicatrizando progresivamente y se hizo más pequeña. La paciente no sintió mucho dolor después de unos días de usar Comfeel®



Día 7




Día 22



Día 30

Reevaluación de la herida al final del período de tratamiento

Describe los hallazgos según tipo de tejido y exudado.
En otros, marque "x" para los hallazgos de la evaluación o indique "O" si no está presente.

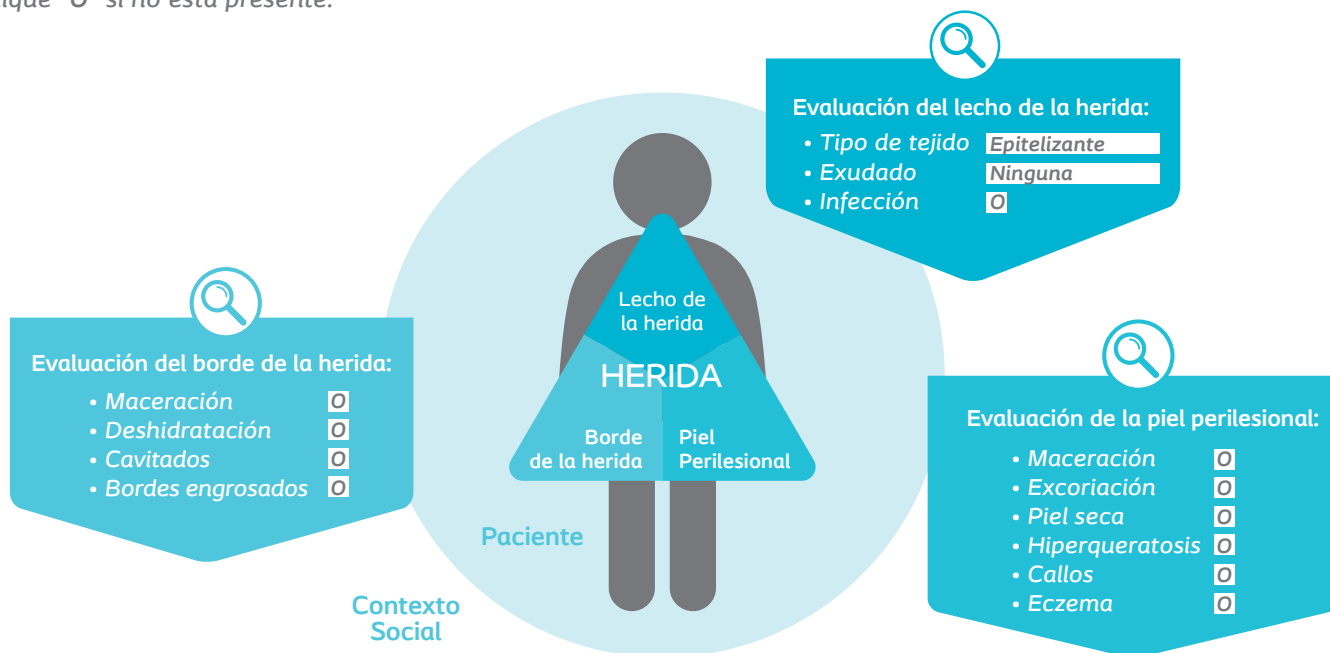

Conclusión

La herida quedó completamente curada.

Comfeel® Plus permitió que se tratara la herida sin perturbar la formación del tejido de granulación.
A su vez, Comfeel® Plus protegió los bordes de la herida y la piel perilesional.

Comfeel® Plus fue suficiente para hacer frente al exudado de la herida en este caso.

La paciente se sintió protegida y cómoda.

Cualquier consulta o sugerencia comuníquese con nosotros. ¡Estamos para asesorarlo!

Asesoramiento
Gratuito **0800 777 7008**

[/ColoplastAR](#) [@ Coloplast.ar](#)

El logo de Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. © 2022-11.
Todos los derechos reservados. 3050 Humlebaek, Dinamarca.



Coloplast de Argentina S.A
Boulevard 547 Piso 8
C1106ABG Buenos Aires
Teléfono: (011) 3985-5900
www.coloplast.com.ar